

QUART DVT\_150

## DVT-Prüfkörper nach DIN 6868-150



# QUART DVT\_150

Prüfkörper für Digitale Volumen-Tomographie in der HNO und für Humanmedizinische 3D-Röntgenmodalitäten




Der QUART DVT\_150 Prüfkörper dient der Sicherstellung der Bildqualität an Durchleuchtungsgeräten in der Humanmedizin, die mit einer 3D-Funktion ausgestattet sind. Mit dem Phantom können auch 3D-Röntgengeräte geprüft werden, die in der HNO eingesetzt werden.

Basierend auf dem Prüfkörperkonzept im Anhang C der DIN 6868-150:2013-06 erfüllt der QUART DVT\_150 sämtliche Anforderungen dieser Norm.

## Einfache Positionierung und Auswertung

Der Prüfkörper wird für die Prüfung im Isozentrum des Röntgengerätes positioniert. Anschließend wird eine Aufnahme ausgelöst und das Bild des Prüfkörpers visuell ausgewertet. Abhängig vom Einsatzgebiet des Röntgengeräts muss jeweils eine bestimmte Art und Anzahl von Kontrastbohrungen erkennbar sein (siehe Abb. rechts).

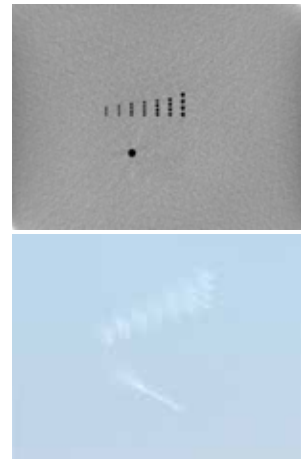

## Prüfkörperbeschreibung

- \_ Abmessungen: 120x120x60 mm
- \_ 1 Mittlere Schicht (Dicke: 10 mm) mit den Kontrastbohrungen
- \_ 7 Gruppen aus Niedrigkontrastbohrungen mit den Durchmessern:  
0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,3 mm  
sowie ein 2,5 mm Tunnel durch den gesamten Prüfkörper
- \_ 2 Vollständig homogene Schichten (Dicke: jeweils 25 mm)

## Prüfparameter

- \_ Niedrigkontrastauflösung
- \_ Artefakte
- \_ Homogenität

## Besonderheiten

- \_ Simple qualitative Prüfung
- \_ Einfache Positionierung

## LIEFERUMFANG

- ✓ QUART DVT\_150 Prüfkörper
- ✓ Bedienungsanleitung
- ✓ Transportkoffer

深圳为尔康科技有限公司



联系人：曾祥满 手机：13632925349

QQ：274798107 电话：0755-28896837

地址：深圳市龙岗区沙平北路111号608A

网址：www.medicalQC.com 邮箱：szchina1718@163.com

